

# Askina® Barrier Film

Пропускающий воздух защищающий кожу раствор



## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- › Распылитель бутылки держать на расстоянии 10-15 см от кожи, распылить равномерный слой на область кожи, нуждающуюся в защите.
- › Дать распыленному раствору подсохнуть в течение примерно 30 секунд, чтобы образовалась защитная пленка.

Askina® Barrier Film – это быстросохнущий пропускающий воздух прозрачный защищающий кожу раствор, который используется для защиты поврежденной кожи от выделений, а также от вызванной пластырем травмы или от повреждения от трения.

- › Быстро сохнет (менее чем за 30 секунд).
- › Прозрачный: позволяет визуальную оценку состояния кожи.
- › Экономически эффективен. Защита длится до 3 дней.
- › Удаление легкое.
- › Улучшает фиксацию повязок и липких лент.
- › Не снижает эффективность подушечек от недержания.
- › Не ухудшает фиксацию частей стомы.

## Показания

- › Предотвращение повреждения кожи, вызванного влажностью или трением.
- › Защита подверженной опасности кожи от мацерации или царапания.
- › Защита нежной эпителизации от повреждений.

## Примеры использования



① Кожа в областях риска: пациент с недержанием мочи



② Дерматит, вызванный недержанием, с повреждением кожи.



③ Мацерация кожи вокруг раны.



④ Кожа вокруг мест введения дренажа.



⑤ Защита кожи вокруг стомы.

Askina® Barrier Film	Размер упаковки	Код изделия
	28 мл спрей	4002801

