

Askina® Barrier kreem

Niisutav kaitsekreem ohustatud nahale

UUS!



- Tõhus inkontinentsist tingitud nahakahjustuste ennetamisel.
- Kontsentreeritud: väikesest kreemikogusest jätkub suurele pinnale.
- Ei vähenda inkontinentsipadjakeste imavust.
- Ei halvenda plaastrite ja sidemete kinnituvust.
- Annab piisava niiskuskaitse kord päevas kasutamisel.

Askina® Barrier kreem tagab naha kestva kaitse inkontinentsipatsientidel, kelle nahk puutub pidevalt kokku uriini ja/või väljaheidetega. Kreem imendub kiiresti, jättes nahapinnale vetthülgava „hingava“ kile, mis pesemisel kohe ei eemaldu. Samaaegselt kaitsega välise niiskuse vastu pakub kreem tõhusat niisutust liiga kuivale nahale. Sobib naha kaitsmiseks kõikjal, kus pikemaajaline kontakt kehavedelikega suurendab nahakahjustuste riski.

Näidustused

Askina® Barrier kreem on mõeldud kasutamiseks kahjustamata nahal.

Askina® Barrier kreem sobib kaitse ja niiskustõkkena:

- uriinipidamatusest või teistest kehavedelikest põhjustatud matserratsiooni ennetamiseks,
- tundliku või õrna naha, samuti ülikuiva naha, sealhulgas haavaümbruse naha kaitsmiseks,
- nahaärrituse vältimiseks.

Askina® Barrier kreemi kasutusvõimalused on mitmekesised, näiteks:

1. kaitsta inkontinentsipatsiendi nahka uriini ja/või väljaheidete eest,
2. takistada väga halvas seisundis naha edasist kahjustamist pidamatusega patsiendil,
3. niisutada ja hoida eriti kuiva ning õrna haavaümbruse nahka liimplaastri kahjustuste eest,
4. hoida ära higistamise tõttu nahavoltides tekkida võivat haudumust.

Tähelepanu!

- Enne kreemi kasutamist peab nahk olema täiesti kuiv.
- Kandke Askina® Barrier kreemi nahale väga õhukese kihina.
- Kui nahka puhastatakse tihti (mitmeid kordi päevas), tuleks kreemi nahale kanda iga päev uuesti.

Tootekood	Askina® Barrier kreem
4112801	28 g tuub
4119201	92 g tuub

Tootja: **B. Braun Hospicare Ltd.** Collooney, Co. Sligo Iirimaa Hulgimüüja: **B.Braun Medical OÜ** Kadaka tee 70b, Tallinn 12618, Eesti www.bbraun.ee